

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

UNICWHITE SMILE GEL

HOME TEETH WHITENING



**BLANQUEAMIENTO DENTAL PROFESIONAL DESDE CASA.
SIN PERÓXIDOS. SIN SENSIBILIDAD.**



FÓRMULA SIN
SENSIBILIDAD



RESULTADOS RÁPIDOS
Y VISIBLES



PROTEGE EL
ESMALTE DENTAL



NO DAÑA
LAS ENCÍAS

UNICWHITE SMILE GEL

GEL BLANQUEADOR RESPETUOSO CON EL ESMALTE DENTAL

Gel blanqueador dental formulado con un 18% de PAP, un activo de última generación que **elimina las manchas sin liberar radicales libres ni dañar el esmalte**. Su fórmula **sin peróxidos** ayuda a conseguir una **sonrisa visiblemente más blanca sin sensibilidad**.

El PAP (ácido ftalimidoperoxicaproyico) representa una nueva generación en tecnología blanqueadora. A diferencia de los geles con peróxido, presentes en muchos productos cosméticos pero limitados por normativa al 0,1%, el PAP permite una acción más eficaz y segura en concentraciones elevadas (hasta un 20%), con **resultados visibles en menos tiempo y sin comprometer el esmalte**.

Activado por la luz azul del dispositivo UNICLED WHITE SMILE 5.0, el gel potencia su **eficacia sobre manchas causadas por café, vino o tabaco**.

Puede utilizarse como tratamiento independiente o como aliado para prolongar los efectos del blanqueamiento profesional, con una fórmula avanzada que combina tecnología, eficacia y cuidado.

Enriquecido con **aceite esencial de menta**, ofrece un sabor mentolado suave y una sensación de frescor durante y después de cada aplicación. El tratamiento incluye **16 ampollas monodosis para 1 mes de uso, con sesiones de solo 10 minutos**.

♥ BENEFICIOS

- **Blanqueamiento** eficaz **sin peróxidos ni sensibilidad**.
- **Compatible** con **dientes y encías sensibles**.
- Fórmula **Vegana** y **Biodegradable**.
- Formato monodosis **travel-friendly**.
- **Resultados visibles desde la segunda semana**.

🧪 EFICACIA PROBADA

¡HASTA
8 TONOS MÁS BLANCOS
EN 4 SEMANAS!

*Resultados probados en estudios clínicos independientes. La intensidad del blanqueamiento puede variar según el tono natural del diente.

MODO DE USO

Para obtener resultados óptimos, sigue estos 4 pasos sencillos:



PASO 1

Con los dientes limpios, aplica el contenido de una ampolla de **UNICWHITE SMILE GEL** de forma uniforme sobre el bucal del dispositivo. Asegúrate de cubrir toda la superficie que estará en contacto con los dientes.




PASO 2

Introduce el dispositivo en la boca, asegurándote de que quede correctamente colocado, y pulsa el botón de encendido para iniciar el tratamiento.



PASO 3

Déjalo actuar durante 10 minutos. El dispositivo es inalámbrico, por lo que puedes continuar con otras actividades mientras funciona. Se apagará automáticamente al finalizar.

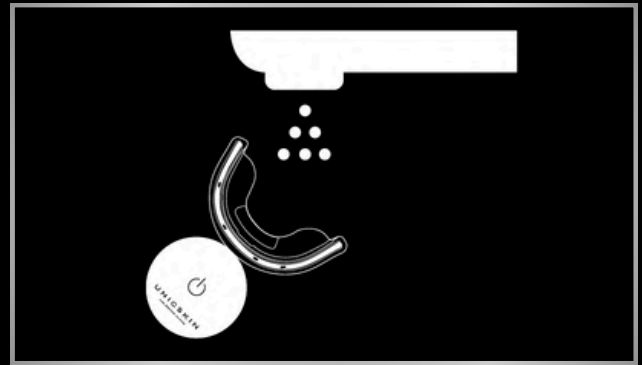

PASO 4

Retira el dispositivo, enjuaga la boca y limpia con cuidado el bucal después de cada uso. Puedes lavarlo con agua, secándolo después con un paño suave. Evita mojar el cuerpo del dispositivo para no dañarlo.

Una vez limpio el dispositivo, devuélvelo a su estuche para su carga. El sistema de esterilización UV-C se activa automáticamente a los 5 segundos de cerrar la tapa; se encenderá una luz para indicar que el proceso ha comenzado.

Para resultados óptimos, úsalo 4 veces por semana durante 4 semanas. Se recomienda repetir el tratamiento completo cada 2-3 meses como mantenimiento.

INCI

GLYCERIN, WATER (AGUA), PHTHALIMIDOPEROXYCAPROIC ACID, XYLITOL, TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, PVP, POTASSIUM MICA, MENTHA ARVENSIS LEAF OIL, TITANIUM DIOXIDE.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué ingredientes activos contiene el gel?

El gel contiene un 18% de PAP (Phthalimidoperoxycaproic Acid), un agente blanqueador de nueva generación que elimina manchas sin dañar el esmalte. No contiene peróxidos y está enriquecido con extracto de menta para aportar frescor.

¿Es seguro para dientes sensibles?

Sí. La fórmula está diseñada específicamente para evitar sensibilidad, ya que no contiene peróxidos ni ingredientes abrasivos. Es apta para personas con esmalte débil o encías sensibles.

Se puede usar sin el dispositivo LED?

No se recomienda. El gel está formulado para activarse con la luz azul del dispositivo UNICLED WHITE SMILE 5.0, que potencia la acción del PAP. Sin la luz, el efecto blanqueador puede ser notablemente menor.

¿Cuántas veces a la semana debo usarlo?

Para obtener resultados óptimos, se recomienda usar 4 veces por semana durante 4 semanas consecutivas. Posteriormente, puede repetirse el tratamiento cada 2-3 meses como mantenimiento.

¿El gel afecta a carillas, fundas o implantes?

No. El gel actúa únicamente sobre el esmalte dental natural. No altera el color de materiales restauradores como porcelana, composite o zirconio.

¿Puedo guardar las ampollas una vez abiertas?

No. Cada ampolla es de un solo uso. Se recomienda desecharla inmediatamente después de cada aplicación para garantizar la higiene y la eficacia del producto.

¿Tiene sabor?

Sí, el gel está aromatizado con menta, lo que proporciona una sensación de frescor en la boca durante y después del tratamiento.

PRECAUCIONES DE USO

- Este gel está destinado exclusivamente a fines estéticos y debe utilizarse solo según las instrucciones indicadas en este manual. No ha sido probado para otros usos.
- No aplicar el gel sobre las encías ni tragar el producto.
- No mojar el cuerpo del dispositivo. Solo puede limpiarse la parte bucal con agua y secarse con un paño suave.
- No utilizar si llevas ortodoncia fija (brackets metálicos), retenedores o aparatos removibles durante la sesión.
- Consulta con tu dentista antes de usarlo si tienes implantes, carillas, fundas o sensibilidad dental severa.
- No utilizar si presentas úlceras, heridas, llagas abiertas, infecciones activas en la boca o has sido sometido recientemente a intervenciones dentales.
- No utilizar si estás embarazada, planeas estarlo o te encuentras en periodo de lactancia. El dispositivo no ha sido testado en estas condiciones, por lo que se desconoce el riesgo para la madre o el bebé.
- No utilizar si padeces alguna afección de fotosensibilidad (natural o inducida por medicamentos), incluyendo lupus eritematoso, eczema fotosensible o albinismo.
- No utilizar si estás tomando medicamentos que puedan causar fotosensibilidad (como ciertos antibióticos, fármacos de quimioterapia o diuréticos).
- No usar si padeces migrañas o dolores de cabeza inducidos por la luz.
- No compartir el dispositivo con otras personas por razones de higiene.
- No utilizar en menores de 16 años.
- Mantener fuera del alcance de los niños y almacenar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor o luz solar directa.

Si tienes dudas sobre tu estado de salud o los medicamentos que estás tomando, consulta con tu dentista o médico antes de iniciar el tratamiento.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o comentario que le gustaría compartir con nosotros, por favor escríbenos a la siguiente dirección de correo electrónico: customerservices@unicskin.com.

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

EXPERTOS GLOBALES EN TECNOBELLEZA & BELLEZA EN EL HOGAR

RESULTADOS EFICACES PRUBADOS POR LA CIENCIA

SOSTENIBILIDAD & FÓRMULAS +92% DE ORIGEN NATURAL

LUJO INNOVADOR A TU ALCANCE
